

## 生物指示剂 (干热灭菌)

### 《使用说明书》

#### 菌种

Bacillus atrophaeus NBRC13721 (ATCC 9372)

#### 培养液成分

培养液: 大豆蛋白胨

指示药: 酚红指示剂

#### 保管上的注意

- 请在 2~25℃ 避光保管。  
(培养液请在 2~10℃ 保管。)
- 避免靠近灭菌器和化学消毒剂。


#### 使用前的注意

- 请确认有效期限。
- 确认产品的完整性。
- 冷藏保存时, 请将本品恢复至室温后使用。

#### 废弃时的注意

- 被判定灭菌不完全以及超过有效期的生物指示剂, 必须经过灭菌处理 (121℃、30 分) 后废弃。

### 使用方法

- 将安瓿瓶放入干热灭菌的容器中, 进行干热灭菌处理。  
(灭菌温度: 160~350℃)
- 灭菌完成后, 取出安瓿瓶, 移至超净台。
- 安瓿瓶充分冷却后, 让蓝色圆点朝上, 掰开安瓿瓶颈部。  
 **注意: 严禁直接用手指掰开安瓿瓶。操作时为避免受伤, 请务必佩戴防护眼镜、口罩及手套。**
- 将安瓿瓶内的菌条倒入培养液中, 在 30~37℃ 温度间培养 48 小时或 7 天。
- 阳性对照: 将未经过灭菌处理的菌条从安瓿瓶倒入培养液后, 以同样方法同时进行培养。每次使用时应进行阳性对照。

### 结果判定

**阴性**

⇒ 培养液颜色为红色无变化 ⇒ 灭菌完全

**阳性**

⇒ 如阳性对照所示, 培养液颜色变黄  
⇒ 灭菌不完全

企业卫生许可证: 沪卫消证字 (2016) 第 0023 号  
执行标准: Q31 / 0112000345C001



生产商

上海福泽医药器材有限公司  
上海市闵行区申富路 128 号 (邮编: 201108)  
TEL: 021-54422550 FAX: 021-54422510  
http://www.fzme.com

発売者

福沢商事株式会社