

生物指示剂 (环氧乙烷灭菌)

《使用说明书》

贮存条件

- 在温度 2~25°C、相对湿度 20~80%条件下，避光保存。
- 避免靠近灭菌器和化学消毒剂。

使用前的注意事项

- 确认有效期。
- 确认产品的完整性。
- 冷藏保存时，请将本品恢复至室温后使用。

废弃时的注意事项

- 阳性对照、被判定灭菌不完全以及超过有效期的生物指示剂，必须经过灭菌处理（121°C、30 分）后废弃。

使用方法

- 1 将芽孢菌片袋按贵方的灭菌方法放入环氧乙烷灭菌装置内与被灭菌物品同时灭菌。
- 2 灭菌处理后，将菌片袋移至超净工作台，在无菌条件下，打开菌片袋将菌片倒入培养基中。
- 3 立即将含有菌片的培养基放入培养器内培养。
培养温度：**30~37°C** 培养时间：**48 小时或 7 天**
- 4 阳性对照：将同一批号未经灭菌处理的芽孢菌片袋中取出芽孢菌片放入培养基中，以同样方法同时进行培养。每次使用时应进行阳性对照。

判定结果

阴性

培养基颜色保持不变或清纯度无变化 ⇒ 灭菌处理完全

阳性如阳性对照所示培养基颜色发生变化（变为黄色）或有发生浑浊 ⇒ 灭菌处理不完全
呈现阳性的原因有以下三种可能。

- 1) 由于灭菌物品的影响
- 2) 培养手法不当
- 3) 灭菌器自身的问题

【含菌量】 $5 \times 10^5 \sim 5 \times 10^6$

【企业卫生许可证】沪卫消证字（2016）第 0023 号

【有效期】18 个月

【执行标准】Q31 / 0112000345C001

FZ FUKUZAWA® 生产商上海福泽医药器材有限公司
上海市闵行区申富路 128 号（邮编：201108）
TEL: 021-54422550 FAX: 021-54422510
<http://www.fzme.com>

发售商 福泽商事株式会社